

コウノトリ

男性用

専用アプリマニュアル

初期設定



使い方



Planex COMM.

[目次へ戻る](#)

1 会員登録とログイン

アカウントを作成してログインします。

- ①本アプリ起動後、アプリについての説明が表示されます。



内容を確認して[NEXT]をタップ

- ②利用条件にチェックを入れ **[会員登録]** をタップします。

。 。 。 ●

すべての利用条件に同意していただくと
会員登録できます。

✓ 内容を確認して同意します

サービスの利用条件

コウノトリ会員利用規約

第1条(目的)
本規約は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社(以下「

位置情報サービス (LBS) の利用条件

位置情報利用規約に同意すると、位置を活用した広告情報受信
などを含む位置基盤サービスを利用することができます。

第1条(目的)

個人情報の利用条件

コウノトリは個人情報保護法に基づき、利用者の個人情報保護
及び権利を保護し、利用者が円滑にご利用頂くために、次のよ
うな処理方針を設けています。

ここをタップ
すると、
すべての項目に
チェックが入り
ます

[ログイン](#)

[会員登録](#) →

[会員登録] をタップ

初期設定



[目次へ戻る](#)

③情報を入力します。入力が完了したら
[会員登録] ボタンをタップしてください。

※入力したメールアドレスとパスワードは、
アカウントへログインする時に使用します。

The screenshot shows the '会員登録' (Member Registration) screen. At the top, there is a title '会員登録' and a close button 'X'. Below the title, there is a section for 'メール' (Email) with three input fields: 'メール (6~30字)' (Email (6-30 characters)), 'パスワード (6~30字)' (Password (6-30 characters)), and 'パスワードを確認' (Confirm Password). Each field has a corresponding icon (envelope, key, and lock) and a callout box with instructions: 'メールアドレスを入力' (Enter email address), 'パスワードを入力' (Enter password), and 'パスワード再入力' (Re-enter password). Below this is a section for 'あなたのプロフィールを入力します。ご希望のニックネームが利用できるか、虫眼鏡アイコンをクリックして確認してください。' (Enter your profile. Check if your desired nickname is available by clicking the magnifying glass icon). This section includes five fields: 'ニックネーム' (Nickname) with a magnifying glass icon, '年齢' (Age), '結婚の有無' (Marital Status) with radio buttons for '既婚' (Married) and '未婚' (Single), '身長' (Height) with 'cm' unit, and '体重' (Weight) with 'kg' unit. A callout box explains that the magnifying glass icon can be used to check if the nickname is available and that nicknames cannot be changed after registration. At the bottom, there is a large '会員登録' (Member Registration) button with a hand icon pointing to it and a callout box saying '[会員登録] をタップ' (Tap [Member Registration]).

会員登録

メール

メール (6~30字) ● メールアドレスを入力

パスワード (6~30字) ● パスワードを入力

パスワードを確認 ● パスワード再入力

あなたのプロフィールを入力します。
ご希望のニックネームが利用できるか、虫眼鏡
アイコンをクリックして確認してください。

✓ ニックネーム 入力したニックネーム
が利用できるか虫眼鏡
アイコンをクリックする
と確認できます

✓ 年齢 入力してください

✓ 結婚の有無 既婚 未婚

✓ 身長 入力してください

✓ 体重 入力してください

会員登録

[会員登録] をタップ

ユーザー情報
を入力すると
チェックが入
ります

※ニックネームは、会員
登録後に変更するこ
とができません

- ④ **[ログイン]** をタップします。



ログイン

会員登録 →

[ログイン] をタップ

初期設定



[目次へ戻る](#)

- ⑤ 会員登録で使ったメールアドレスとパスワードを入力して、**[ログイン]** ボタンをタップします。



2 「コウノトリ」の使い方

画面にあるアイコンをタップすると、各機能の画面に切り替わります。



2 -1
精液のチェックを行います

2 -3
製品購入ページを表示

2 -2
チェック結果の履歴を表示

2 -4
アカウント情報などを表示

アプリについての最新の情報を表示

[目次へ戻る](#)

2 -1 精液のチェック

精液のチェックを行う場合は、 アイコンをタップします。

パイプカットの有・無を選択して、**[映像を解析]** ボタンをタップします。



[映像を解析] をタップ

[目次へ戻る](#)

パイプカットをしていない場合

- ①チェックする時の注意事項が表示されます。
内容を確認して **[NEXT]** をタップします。




[NEXT] をタップ

使い方



[目次へ戻る](#)

- ②スマートフォンのフロントカメラに、本体のレンズ部分がくるように設置します。
[解析の開始] ボタンをタップします。

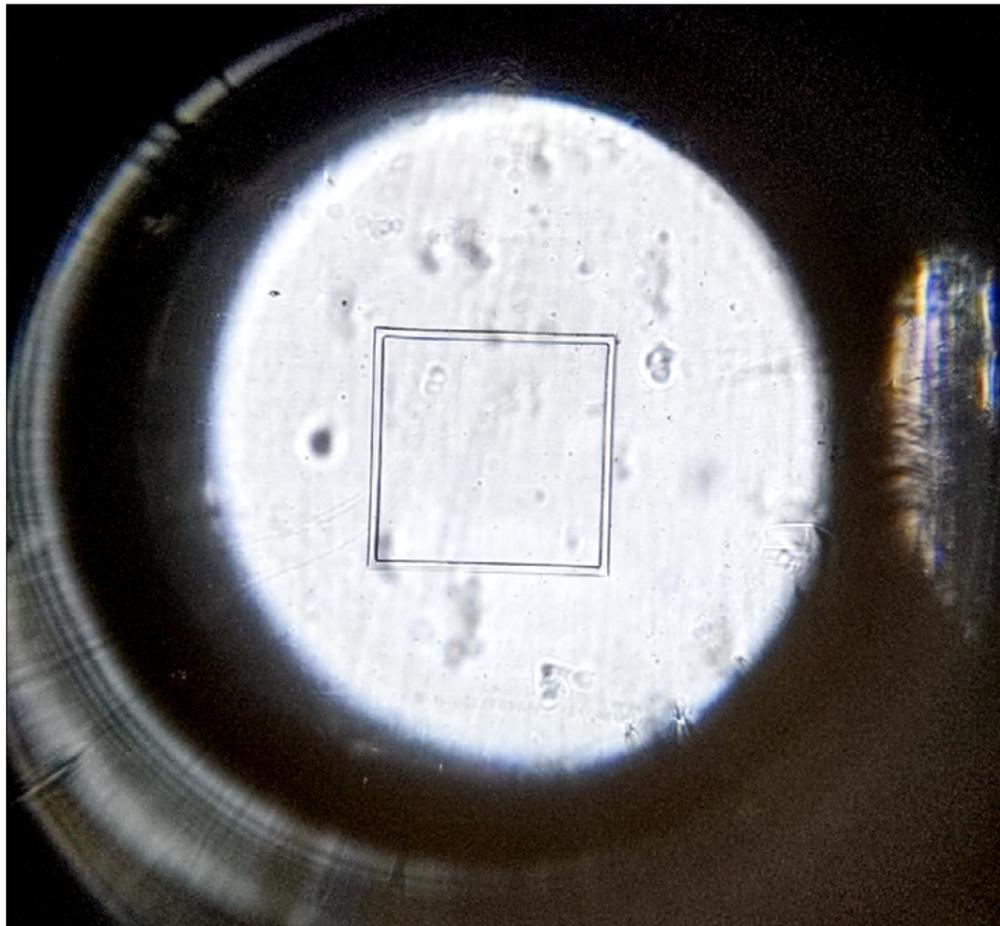


明るい場所で、フロントカメラに本体のレンズ部分がくるように置きます。
四角形が真ん中に表示されるよう調整したら、下のボタンを押してください。

< 解析を開始 →


[解析の開始] をタップ

[目次へ戻る](#)

- ③解析が完了すると、チェックに使用した映像を保存するかの確認メッセージを表示します。

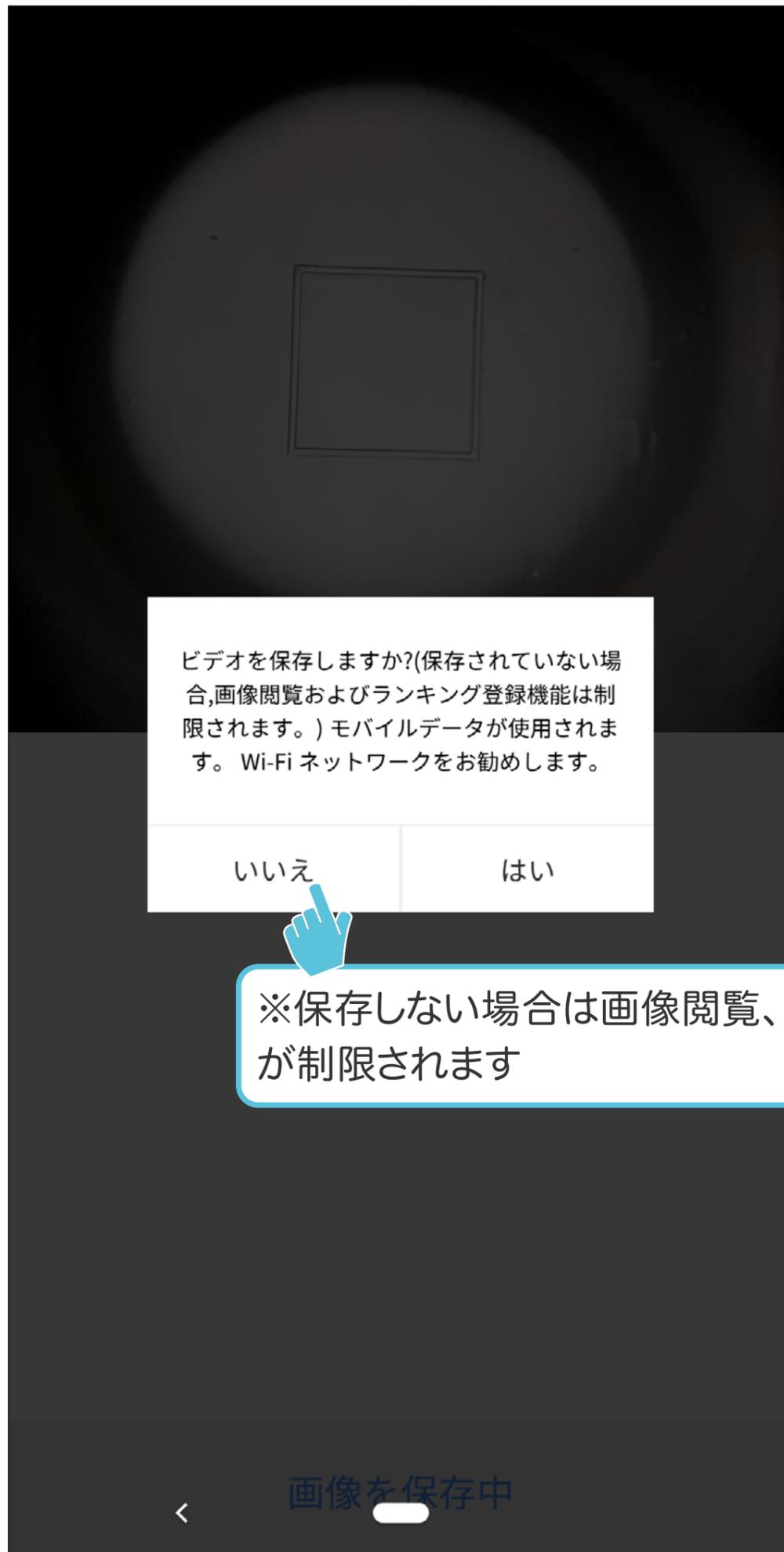

④チェック結果と評価を表示します。

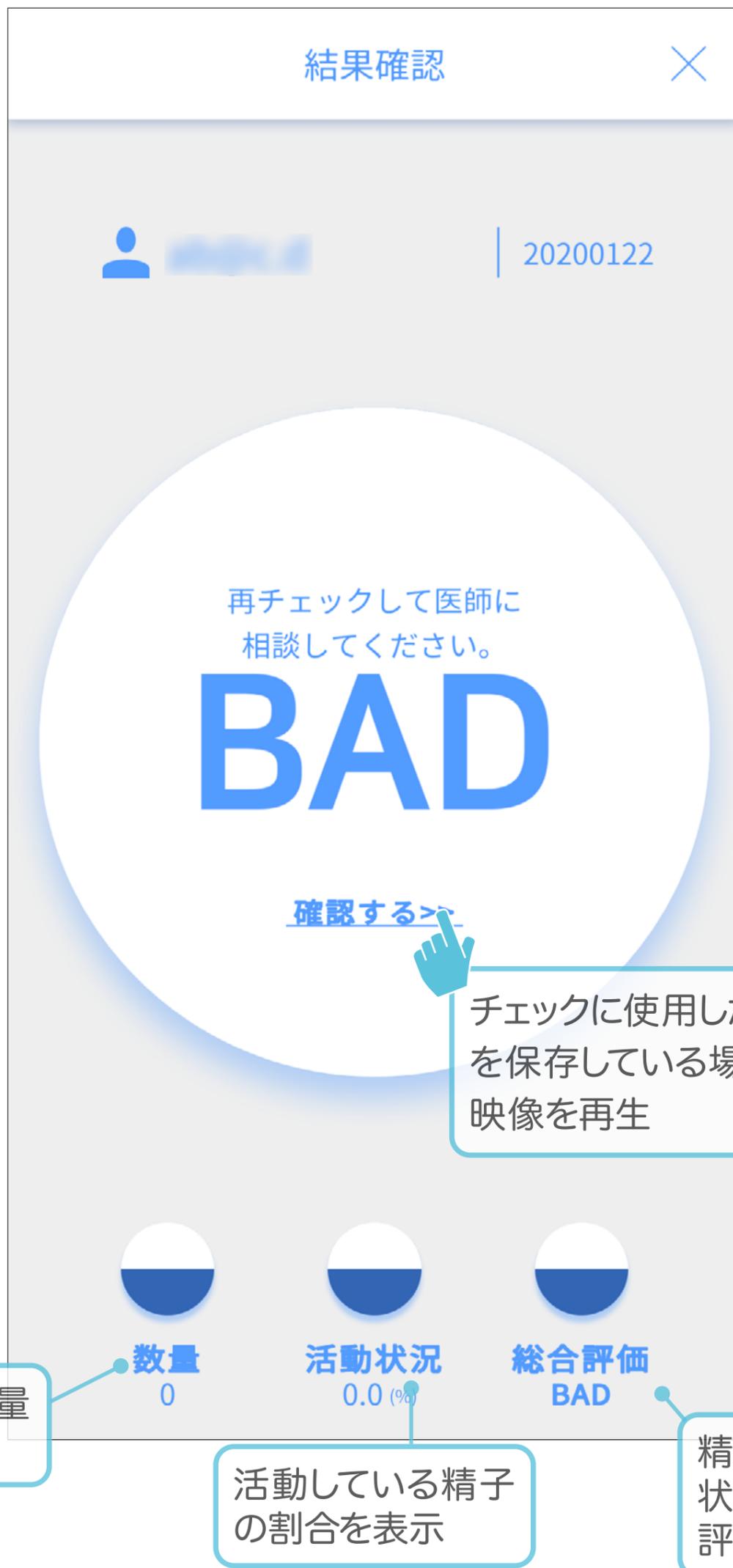

結果確認

再チェックして医師に
相談してください。

BAD

[確認する>>](#)

精子の数量
を表示

活動している精子
の割合を表示

精子の数量と活動
状況を参考にして
評価を表示


チェックに使用した映像
を保存している場合は、
映像を再生

項目	値
数量	0
活動状況	0.0 (%)
総合評価	BAD

[目次へ戻る](#)

パイプカットをしている場合

- ①スマートフォンのフロントカメラに、本体のレンズ部分がくるように設置します。
[保存する] ボタンをタップします。

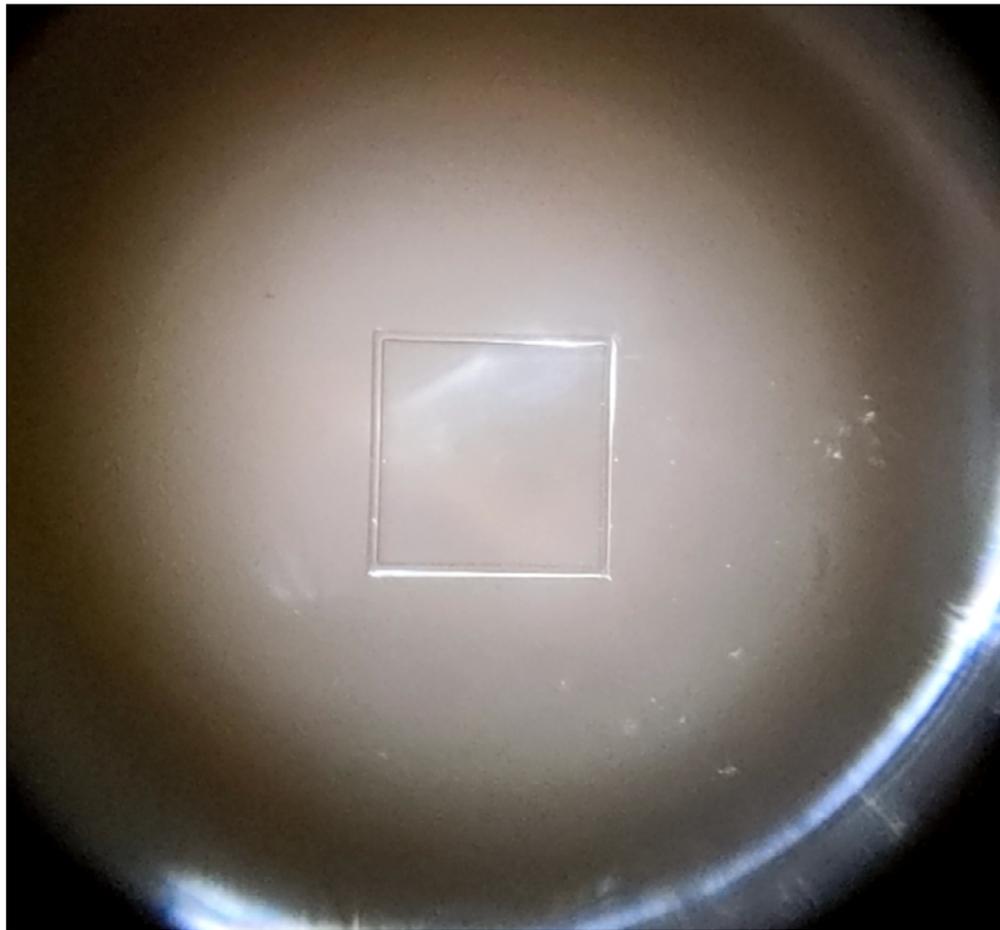

明るい場所で、フロントカメラに本体のレンズ部分がくるように置きます。
四角形が真ん中に表示されるよう調整したら、下のボタンを押してください。


< 保存する →



[保存する] をタップ

[目次へ戻る](#)

- ②解析が完了すると、チェックに使用した映像を保存するかの確認メッセージを表示します。

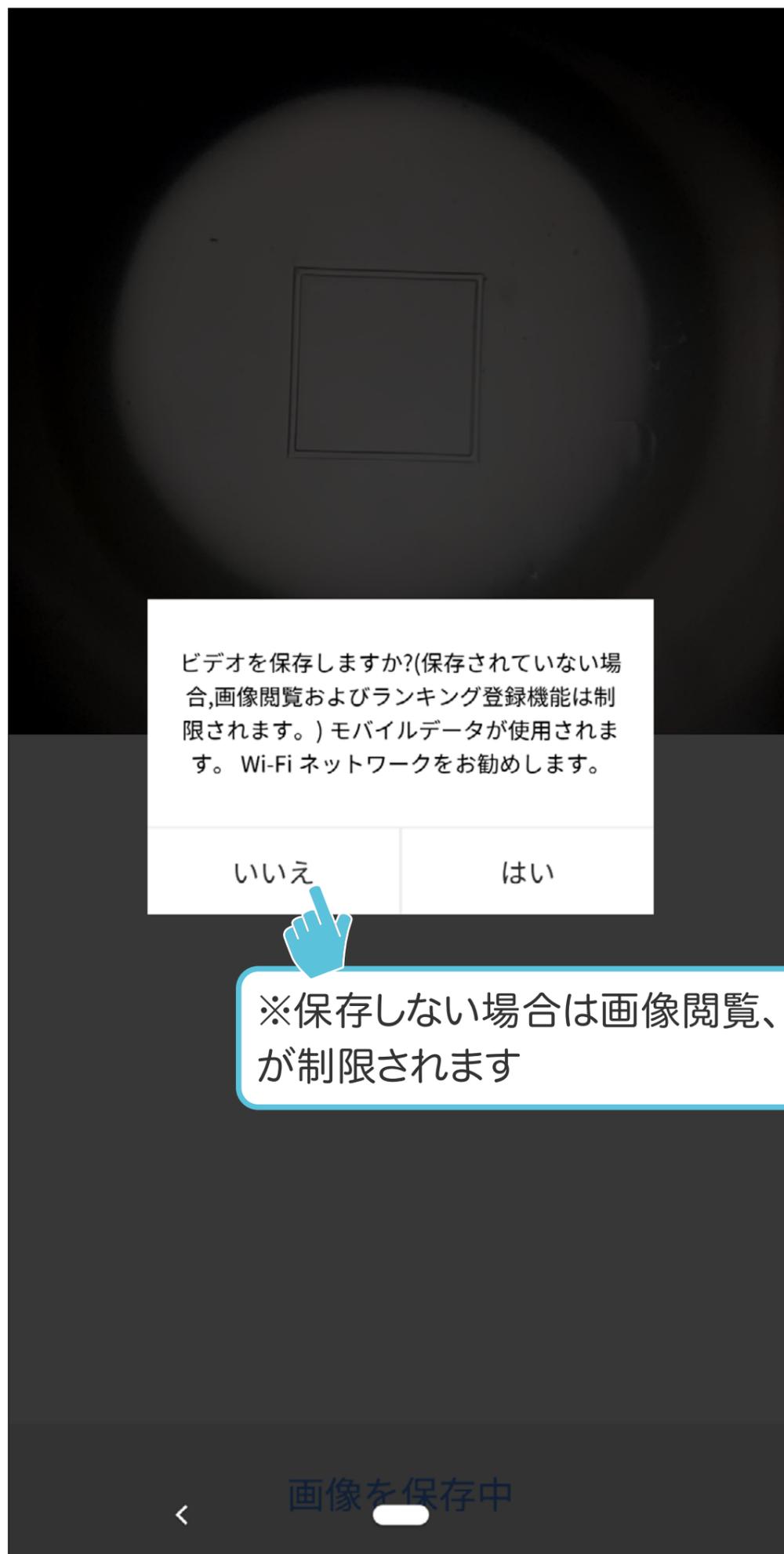

③チェック結果を表示します。



チェックに使用した映像を保存している場合は、映像を再生


精子の数量が多い状態のサンプル映像を再生

精子の数量が少ない状態のサンプル映像を再生

精子が無い状態のサンプル映像を再生

2 -2 最新の結果


チェック結果の履歴を表示します。

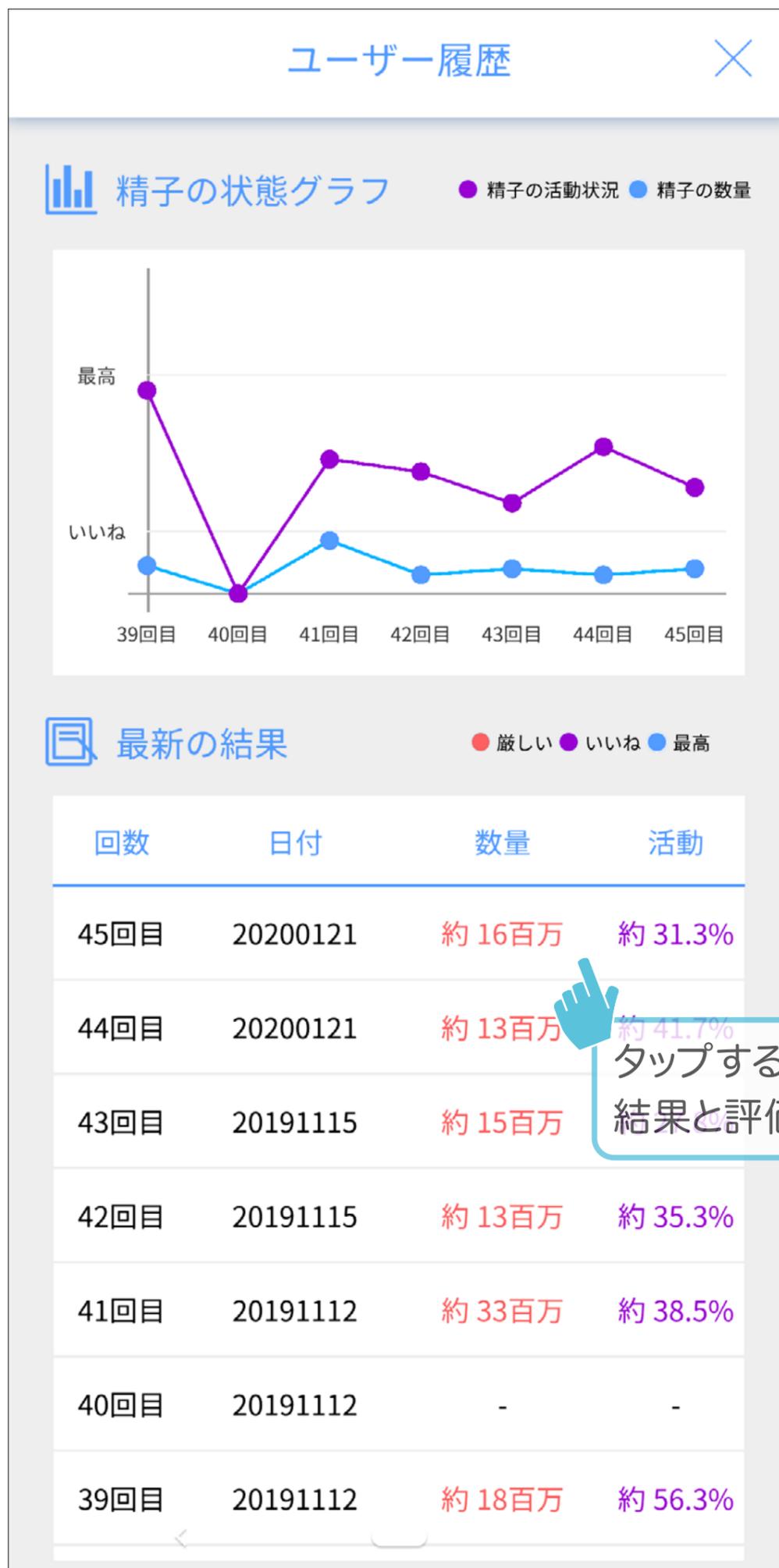

[目次へ戻る](#)

2 -3 製品購入ページ

コウノトリ男性用（HC-PRS02M）や採取キット（HC-PRS02M-Skit4）の購入ページを表示します。

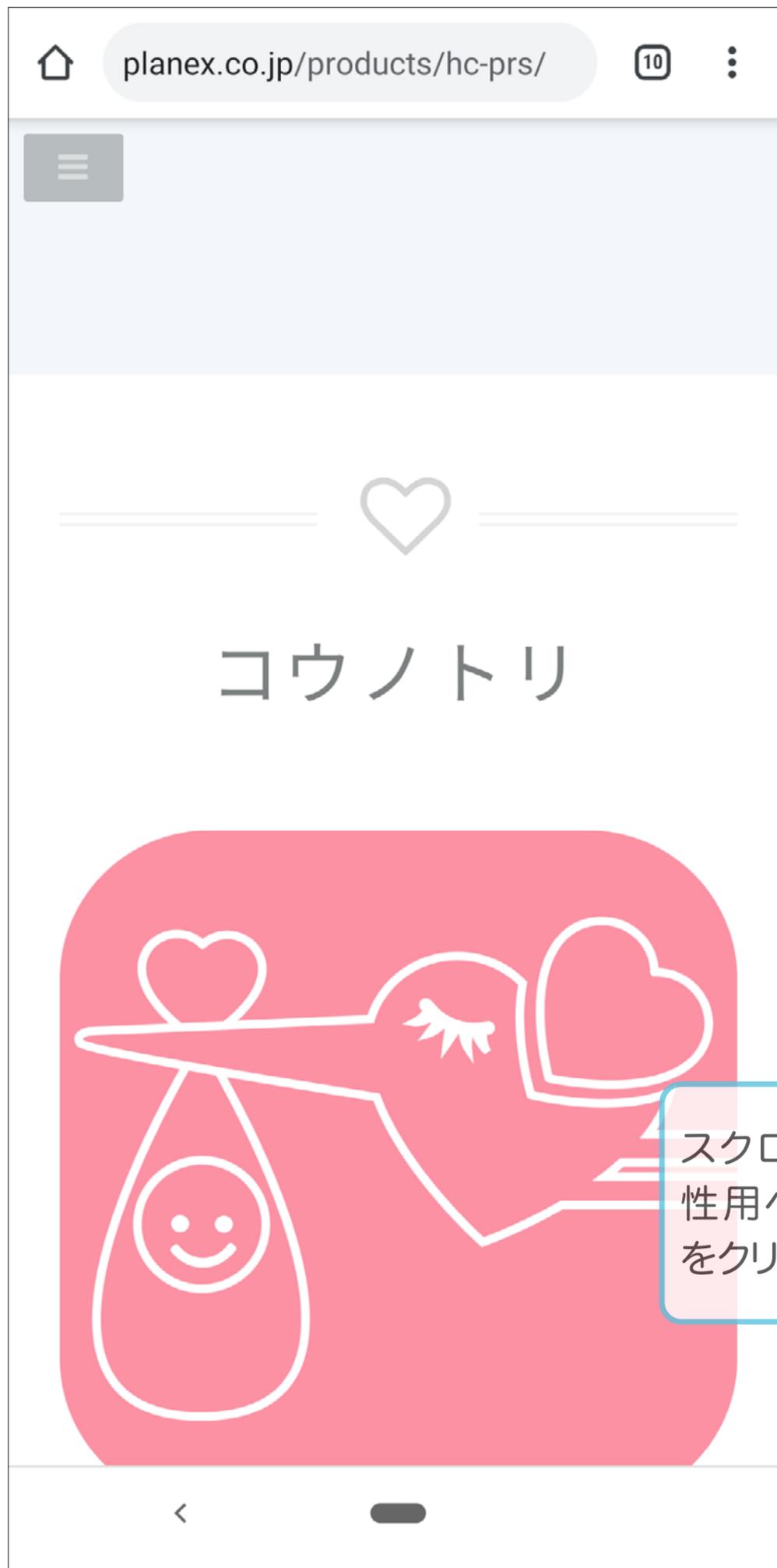

2 -4 詳細を表示

アカウントの設定やコウノトリ男性用 (HC-PRS02M) に関するQ & A を表示します。



【アカウント管理】

アカウントの設定やアプリ情報を表示します。



●ユーザー

会員登録時に入力したメールアドレスを表示します。

●ログイン維持

[オン] に設定すると、アプリを起動時に自動的にアカウントへログインします。
※ログアウトを行うと、ログイン維持の設定が[オフ] に切り替わります。


●プロフィール編集

会員登録時に設定したプロフィール情報を変更できます。



●パスワード変更

アカウントにログインするためのパスワードを変更できます。

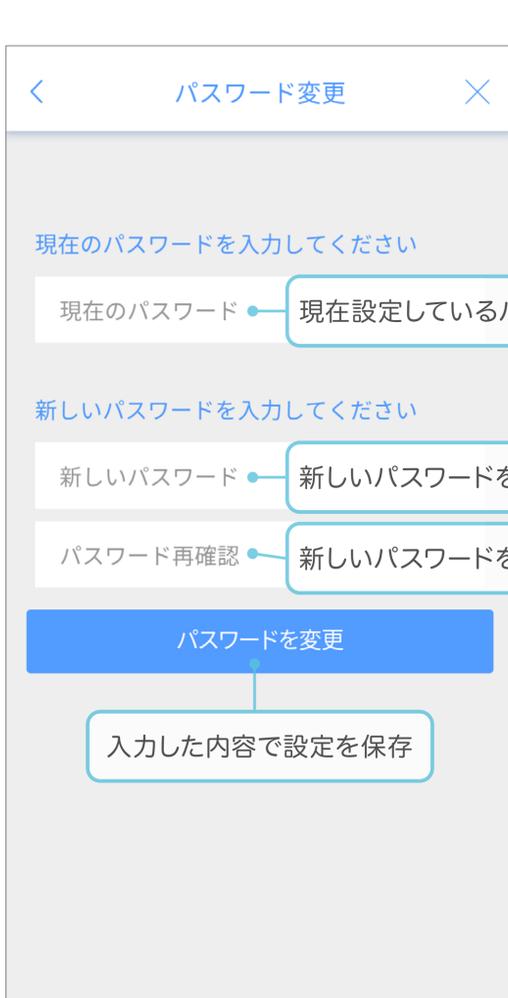

●退会

アプリに設定した情報を削除して、アカウントを削除します。

チェックを入れて[退会] ボタンをタップします。



●登録日

会員登録を行った日を表示します。

●アプリバージョン

「コウノトリ(男性用)」のバージョンです。


●[ログアウト] ボタン

アカウントからログアウトします。

[目次へ戻る](#)

【コウノトリ男性用を購入】

コウノトリ男性用（HC-PRS02M） や採取キット（HC-PRS02M-Skit4） の購入ページを表示します。

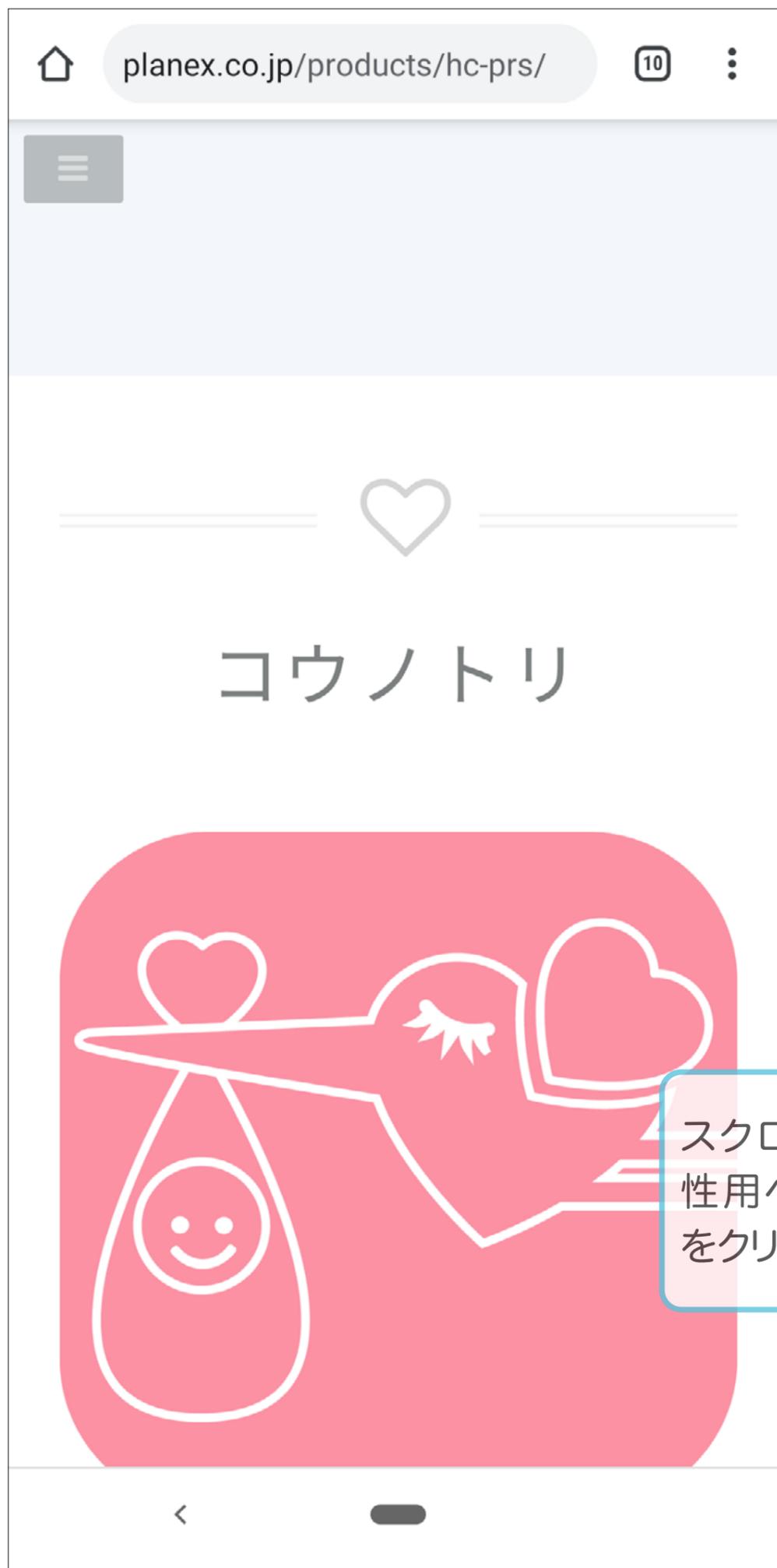

[目次へ戻る](#)

【よくある質問】

コウノトリ男性用についての質問と答えを表示します。

<	よくある質問	×
	コウノトリ男性用とは？	^
<p>- コウノトリ男性用は、いつでもどこでも精子の数量と活動状況を測定できるスマートな精子チェックアプリです。</p>		
	一度の射精で何度でもチェックできますか？	v
	精子のチェック結果に異常があった場合、どうすればいいですか？	v
	映像が暗い場合はどうすればいいですか？	v
	映像がぼやけている場合はどうすればいいですか？	v
	射精後、すぐにチェックできますか？	v
	推奨の待機時間を経過後、どのように測定すればいいですか？	v
	チェック時間はどのくらいかかりますか？	v

[目次へ戻る](#)

【お知らせとイベント】

コミュニティ男性用アプリの最新バージョンの公開情報などを表示します。

